


Tensiómetro de brazo

Manual de usuario

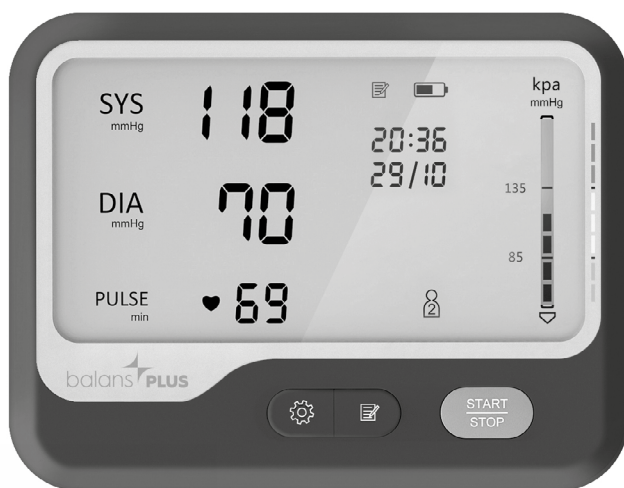

 App
VitalCheck
Monitoriza tu salud


balansPLUS



Manual de usuario

Documento núm: VCTEN

Número de versión: VCTEN.1

Fecha de la última revisión: 06/2024

Modelo: YK-BPA4

Gracias por elegir nuestro tensiómetro. Antes de comenzar a usarlo, lea atentamente el manual de usuario y utilícelo de forma adecuada. El tensiómetro puede utilizarse en hospitales, hogares, escuelas y centros médicos. Es apto para mayores de 12 años, no para neonatos.

Este tensiómetro de brazo se acompaña de un manguito ajustable y es adecuado para la medición de la presión arterial y el pulso en personas.

El monitor de presión arterial incorpora un método de presión inteligente que reduce eficazmente las molestias causadas por el uso de presiones incorrectas y acorta el tiempo de medición prolongando la vida útil del dispositivo y el bienestar del usuario al mismo tiempo.

















Este monitor de presión arterial funciona con 4 pilas AA.




Memoriza hasta 99 grupos de datos de las mediciones de dos personas, que pueden guardar los datos por separado. Puede mostrar la lectura media de los últimos 3 grupos de resultados de medición.



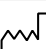



Este monitor de presión arterial tiene la función de clasificación de la presión arterial, lo cual resulta útil para que el usuario pueda juzgar si su presión arterial es normal o no.

Precauciones

Las advertencias y los símbolos gráficos que aparecen en el manual de usuario tienen por objeto permitir a los usuarios utilizar el producto de forma segura y correcta, a fin de evitar daños a estos y a terceros. Los significados específicos son los siguientes:

Descripción de los símbolos			
	Advertencia: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría dar como resultado lesiones graves.		Atención: Estas indicaciones se deben respetar para evitar posibles daños en el aparato, el entorno y las personas.
	Prohibición: se refiere a los contenidos prohibidos, es decir, a lo que no está permitido hacer cuando se utiliza el dispositivo.		Prohibición de desmontaje.
	Advertencia sobre la corriente eléctrica.		Advertencia de incendio.
	Parte aplicada de tipo BF		Número de serie
	Consulte el manual de instrucciones		Representante de la Unión Europea
	Fabricante		Recogida selectiva
	Fecha de fabricación		Mantener seco
	El marcado de conformidad CE 0123 representa el número de identificación del Organismo Notificado.		Indica el lado de la caja que debe ir hacia arriba durante el transporte

	Producto sanitario		Mantener alejado de la luz solar
	Rango de humedad		Rango de temperatura
IP21	Protegido contra objetos extraños sólidos de 12,5 mm de diámetro y superiores. Protegido contra la entrada de agua con efectos nocivos: goteo vertical		No fabricado con látex de caucho natural

Símbolo	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> Los pacientes con arritmia, diabetes, mala circulación sanguínea o apoplejía deben utilizar el producto bajo la supervisión de un médico. Es muy peligroso que los pacientes juzguen y traten por sí mismos los resultados de las mediciones. Por favor, siga las indicaciones del médico, el autodiagnóstico puede resultar peligroso para el paciente. Puede haber un riesgo, como entumecimiento o dolor del brazo, que puede ser causado por el inflado excesivo del manguito. Por razones de seguridad, guarde el dispositivo en un lugar fuera del alcance de los niños.
	<ul style="list-style-type: none"> Se prohíbe el uso del tensiómetro en bebés y niños menores de edad sin la supervisión de un adulto o un profesional de la salud. No utilice el dispositivo para otra cosa que no sea medir la presión arterial, ya que podría causar un accidente o daños en las personas. Por favor, no utilice reactivos químicos como diluyente, alcohol o gasolina para limpiar este producto. No golpee fuertemente el dispositivo ni lo deje caer al suelo. Por favor, asegúrese de utilizar el manguito de brazo especial de este producto, de lo contrario no podrá medir con precisión. No utilice el teléfono móvil cerca del dispositivo. Existe el riesgo de que el dispositivo no funcione correctamente.
	<ul style="list-style-type: none"> Se prohíbe el uso del tensiómetro en bebés y niños menores de edad sin la supervisión de un adulto o un profesional de la salud. No utilice el producto para otra cosa que no sea medir la presión arterial, ya que podría causar un accidente o daños en las personas. Por favor, no utilice reactivos químicos como diluyente, alcohol o gasolina para limpiar este dispositivo. No golpee fuertemente el dispositivo ni lo deje caer al suelo. Por favor, asegúrese de utilizar el manguito de brazo especial de este producto, de lo contrario no podrá medir con precisión. No utilice el teléfono móvil cerca del dispositivo. Existe el riesgo de que el dispositivo no funcione correctamente.
	<ul style="list-style-type: none"> No desmonte, repare o reconstruya el dispositivo y el manguito de brazo del tensiómetro, de lo contrario no funcionará correctamente y perderá la garantía.
	<ul style="list-style-type: none"> Por favor, no manipule el enchufe con las manos mojadas, de lo contrario podría causar una descarga eléctrica o lesiones.
	<ul style="list-style-type: none"> En caso de disponer de la versión con batería, asegúrese de utilizar la fuente de alimentación de CA especial para este dispositivo, de lo contrario podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Asegúrese de utilizar la fuente de alimentación de CA adecuada.

Introducción del producto

Uso previsto

El tensiómetro se utiliza para medir la tensión arterial y la frecuencia del pulso. El tensiómetro puede utilizarse en hospitales, hogares, escuelas y centros médicos. Es apto para mayores de 12 años, no para neonatos.


Contraindicaciones

Arritmia grave.


Descripción funcionamiento

1. Medición: medición oscilográfica.
2. Los resultados mostrados son: presión alta / presión baja / pulso.
3. Conversión de unidades: conversión de unidades de presión arterial disponible en kPa y mmHg (la unidad de arranque por defecto es mmHg).
4. Grupo de memoria: dos grupos de memoria (dos usuarios), cada uno puede memorizar hasta 99 mediciones.
5. Función de reloj: año, mes, día, hora, minuto.
6. Batería baja: cuando se detecta batería baja la pantalla muestra el símbolo "🔋".
7. Indicador de la clasificación de la tensión arterial: la clasificación de la tensión arterial indica la salud de la tensión arterial, véase el cuadro II de la sección "Apéndice".
8. Error: véase el cuadro III de la sección "Apéndice".
9. Función de protección contra sobrepresión: en caso de alcanzar una presión superior a 295 mmHg (20 ms) el tensiómetro se detiene de inmediato y se deshincha el manguito.
10. Función de apagado automático: después de dos minutos de inactividad se apaga automáticamente.


11. Partes del dispositivo

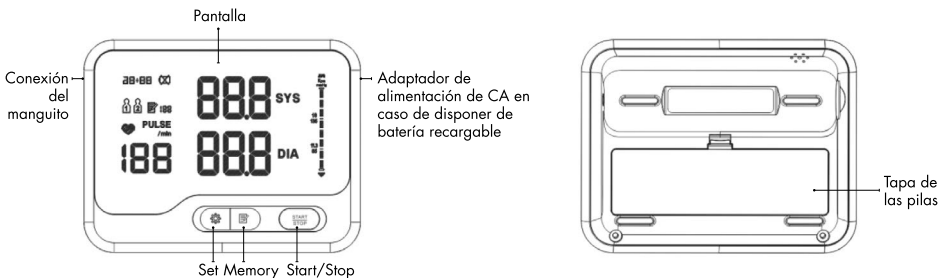

Pantalla de visualización

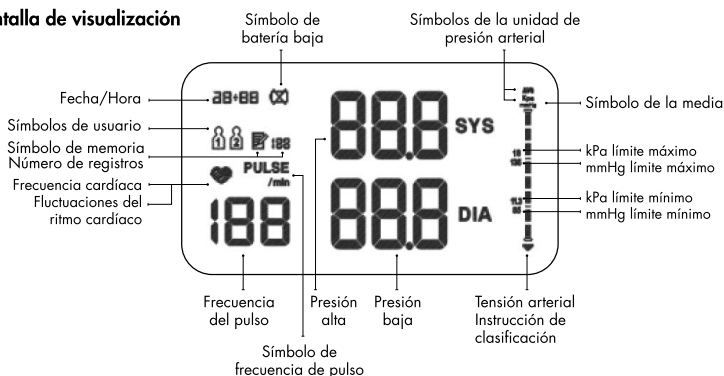

Manguito NIBP

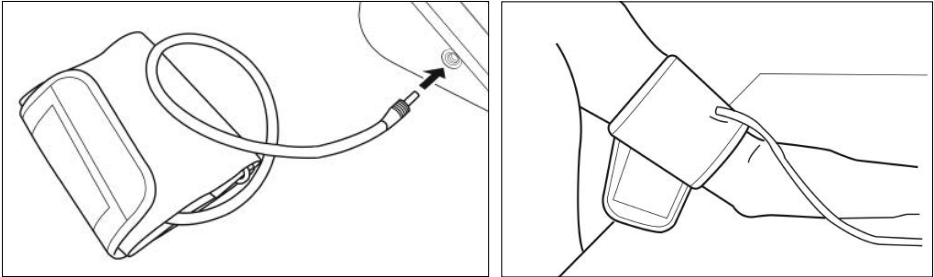

Este dispositivo incluye un manguito de tamaño estándar para la medición de la presión arterial. Apto para perímetros de brazo de 22-42cm.

Diseñado específicamente para adaptarse al tensiómetro YK-BPA4 ref. BPTEN-24.


Este manguito ha sido fabricado con materiales resistentes y duraderos para un uso prolongado. Dispone de una amplia zona de velcro para una mejor sujeción.

Consulte el modo de empleo más abajo en la sección "Uso del manguito NIBP".

Instalación de las pilas

Este dispositivo funciona con 4 pilas AA.

1. Retire la tapa de las pilas siguiendo la dirección de la flecha.
2. Inserte 4 pilas AA, asegúrese de que cada pila está en la dirección correcta.
3. Cierre la tapa de las pilas.

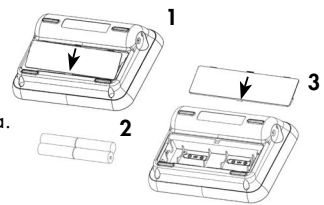

Nota: El icono "🔋" indica que las pilas están a punto de agotarse. Sustituya las cuatro pilas nuevas (del mismo tipo).

- Por favor, apague el dispositivo cuando proceda a reemplazar las pilas.
- Si retira las pilas en el estado de arranque, el temporizador de la fecha y la hora se detendrá, los valores de memoria guardados no se eliminarán.
- Después de reemplazar las pilas, es posible que tenga que restablecer la hora. Para más detalles, consulte la sección "Configuración de usuario".
- Para deshacerse de las pilas usadas rogamos que sean recicladas siguiendo las normas vigentes de su localidad.


Configuración inicial

Este dispositivo puede memorizar automáticamente 99 grupos de mediciones. Almacenará el usuario y la hora de la medición correctos si están bien configurados; de lo contrario, el usuario y la hora de la medición no podrán memorizarse correctamente.


Si desea utilizar la función de memoria, realice la configuración inicial antes de la primera medición. La configuración inicial incluye la configuración del usuario, la hora y la unidad de presión arterial.

Configuración de usuario

En el estado apagado, pulse la tecla "⚙️" hasta que aparezca el símbolo de usuario "1" cuando el símbolo del usuario parpadee en la pantalla, presione el icono de "📝" para cambiar de "1" a "2" y pulse la tecla "⚙️" para confirmar. Acto seguido podrá confirmar y cambiar la hora y fecha al mismo tiempo. El usuario seleccionado será el que aparecerá siempre por defecto "1".

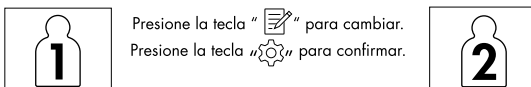


A continuación podrá configurar el año y la hora; la pantalla mostrará 2016 parpadeando, pulsando la tecla "📝" podrá incrementar el valor y cambiar entre 2016-2035, cuando aparezca el año a ajustar, pulse la tecla "⚙️" para confirmar y a continuación podrá configurar el mes y el día al mismo tiempo. El valor del mes estará parpadeando, pulse la tecla "📝" para incrementar el valor hasta llegar al mes deseado (1-12) y luego pulse "⚙️" para confirmar. Acto seguido el valor de la fecha (día del mes) parpadeará, es el momento de ajustarlo pulsando la tecla "📝", el incremento de valor puede oscilar entre los días 01-31, pulse la tecla "⚙️" para confirmar y cambiará al modo de ajuste de "hora" y "minuto" al mismo tiempo, el valor de la hora parpadeará, pulse la tecla "📝", el incremento de valor oscilará entre 0 y 23. Cuando aparezca la hora a ajustar, pulse la tecla "⚙️" para confirmar, el valor de los minutos parpadeará, es el momento de ajustar los minutos, pulse la tecla "📝", el incremento de valor puede oscilar entre 00 y 59, cuando aparezca el minuto a ajustar, pulse la tecla "⚙️" para confirmar.

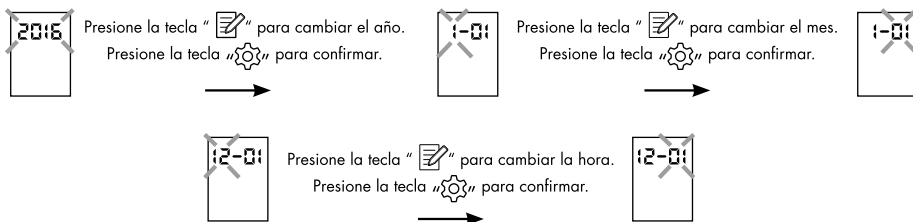

Nota: Mantenga pulsada la tecla "📝" y los números avanzarán más rápidamente.


Ajuste de la unidad de presión arterial

Después de configurar el sonido, pulse la tecla "⚙️" para confirmar y pasará al modo "Unidad de presión arterial" la cual estará configurada por defecto en mmHg (milímetros de mercurio). Es la unidad más usada y la recomendada. Si desea cambiar a Kpa (kilopascuales) pulse la tecla "📝" y a continuación la tecla "⚙️" para confirmar y la configuración ya habrá finalizado.

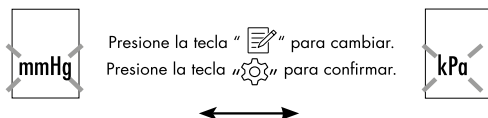

Uso del manguito NIBP


1. Inserte el adaptador en la toma del tensiómetro para el manguito.
2. Ajuste el manguito de forma tubular hasta que sea adecuado para introducir el brazo.
3. Pase el brazo por el manguito. El tubo de aire del manguito debe estar situado en el extremo anterior de la palma de la mano.
4. El manguito debe enrollarse en la parte superior del brazo. Los marcadores de color deben estar situados en el centro del interior del brazo y apuntando hacia abajo, hacia el interior del brazo, el tubo de aire también debe estar situado en el interior y en línea con el dedo medio.
5. La parte inferior del manguito debe estar situada en el codo, a una distancia de 2 a 3 cm del codo.
6. Cierre el manguito con la hebilla para que no quede espacio entre el brazo y el manguito.

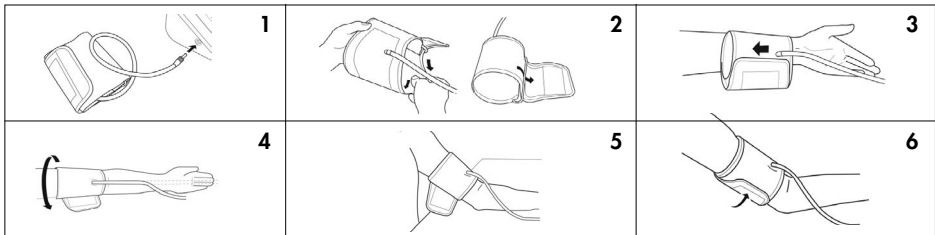

Medir la tensión arterial

Método de medición correcto

Ambos brazos izquierdo y derecho son aptos para realizar una medición. Mantenga el brazo a medir sin ropa. Si no es posible y la pieza de ropa es fina puede realizarse la medición de todos modos. Asegúrese de estar en una sala a temperatura adecuada.

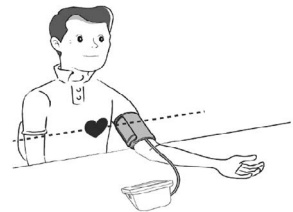

1. Coloque el codo sobre la mesa;
2. La altura del manguito debe coincidir con la del corazón;
3. La palma de la mano debe estar hacia arriba. Relaje el cuerpo.

⚠ Atención

- Si lleva ropa gruesa, no se arremangue, sino quítesela y proceda con la medición.
- Para medir con precisión, preste atención al manguito y asegúrese de que esté bien colocado. (Consulte el punto "Uso del manguito NIBP").
- Por favor, no presione el tubo de aire con los brazos para no obstruir el flujo de aire.
- Por favor, adopte la misma postura para la medición de la presión arterial, todos los días a la misma hora, con el mismo brazo.
- La ubicación del manguito provocará cambios en los resultados de la medición.
- No toque el aparato, el manguito ni el tubo de aire durante la medición.
- El cuerpo debe estar en un estado de relajación.
- Permanezca en silencio durante 4~5 minutos antes de la medición.
- Relaje su cuerpo, no realice actividad muscular.
- No hable ni se mueva durante la medición.
- Por favor, espere 2-3 minutos si desea volver a medir.
- No utilice teléfonos móviles ni otros dispositivos móviles cerca del tensiómetro.

Pasos de la medición de la presión arterial

El dispositivo tiene 2 tipos de unidades de medición de presión arterial, que son mmHg y kPa, por favor consulte "Ajuste de la unidad de presión arterial" para elegir el método de medición deseado. Los ejemplos de los siguientes pasos están tomados con el valor de medición mmHg.

1. Pulse la tecla "START / STOP" para iniciar la medición con el manguito previamente colocado en el brazo, consulte "Uso del manguito NIBP". La pantalla se mostrará en "0" y la medición comenzará de inmediato automáticamente con el proceso de inflado mostrando los cambios de presión del manguito en la pantalla. Durante el proceso también se mide el pulso por lo que se ruega no mover el brazo y mantener una postura adecuada.



2. Cuando el aire del manguito alcanza una presión estable, la bomba deja de inflar, la presión del manguito disminuye gradualmente y se muestra en la pantalla al mismo tiempo el icono del corazón parpadeando.



3. Después de la medición, el dispositivo desinflará el manguito y simultáneamente mostrará su valor de presión arterial y el pulso.

Nota: el dispositivo guardará automáticamente la presión arterial y el pulso en el perfil del usuario que se haya seleccionado antes de iniciar.

Interrupción de la medición:

Si necesita interrumpir la medición por alguna razón (por ejemplo, se siente incómodo), en cualquier momento, pulse la tecla "START / STOP", el dispositivo reducirá automáticamente la presión del manguito hasta desinflarlo por completo.

Consejos importantes:

Para un mismo usuario, el intervalo de espera entre dos mediciones debe ser de al menos 2-3 minutos. Esto es principalmente para dejar que la arteria se restaure al estado de antes de la medición de la presión arterial. En el proceso de medición, si el cuerpo está en movimiento hará que el resultado de la medición no sea exacto o bien que la medición no salga bien. Entonces se mostrará un mensaje de error. En este caso, por favor repita el proceso de medición, y siga los pasos correctos de nuevo para asegurar una correcta medición.

Si en el proceso de medición de la presión arterial se detectan latidos irregulares del corazón provocados por arritmias comunes, se mostrará una señal de "❤️". En estas condiciones, el monitor de presión arterial puede seguir funcionando, pero los resultados pueden no ser exactos, por lo que se sugiere que consulte con su médico para una evaluación precisa.

Respuestas a problemas frecuentes durante la medición

Anomalías	Causa	Solución
Una anomalía alta o baja en las mediciones de la presión arterial	Manguito mal colocado	Coloque correctamente el manguito (véase Uso del manguito NIBP)
	El usuario se ha movido durante la medición	Manténgase relajado y en una postura correcta. Mida de nuevo
	Se ha colocado el manguito con demasiada presión	Manténgase relajado y en una postura correcta. Mida de nuevo
No infla	El manguito tiene una fuga	Reemplácelo por un manguito nuevo
	El manguito no está bien conectado al tensiómetro	Por favor, conéctelo correctamente
Se desinfla muy pronto	El manguito está colocado demasiado flojo	Por favor, ajústelo correctamente
No funciona después de pulsar el botón de inicio		Por favor, inicie el tensiómetro de nuevo
Durante la medición se apaga de repente	Cuando no se utiliza durante mucho tiempo, la variación de temperatura puede agotar la energía de la batería	Cambie las pilas
No se enciende después de pulsar START	Las pilas se han agotado	Cambie las pilas
	Las pilas no están bien colocadas	Instale las pilas correctamente
Otras anomalías	Inicie el equipo de nuevo o bien revise las pilas de nuevo o cámbielas. Si el problema persiste, contacte con el servicio técnico.	

Función de memoria

Visualización de los datos memorizados

Este tensiómetro memoriza dos usuarios y 99 mediciones cada uno. Cuando llega al límite de 99 las nuevas mediciones eliminarán las más antiguas progresivamente.

Nota:

- Para registrar correctamente las mediciones, antes de realizarlas, asegúrese de establecer el usuario y la hora correctos.
- Cuando el número de valores de memoria es inferior a 3, si hay 2 valores memorizados, el botón de memoria mostrará el valor medio de las 2 mediciones, si hay 1 medición memorizada, el botón de memoria mostrará el valor medio de 1 medición.

Lectura de los resultados

Pulse la tecla "📄" para ver el último valor medido, la fecha y hora de cada medición y el número de grupos de memoria se mostrarán junto con el valor medido correspondiente. Pulse la tecla de ajuste para ver el valor medido anterior.



Eliminar las mediciones memorizadas

Pulse prolongadamente la tecla "📄" en el modo memoria y se borrarán todos los valores.



Advertencia

Esta acción borra todos los valores de la memoria, los usuarios deben usar esta función con cuidado.

Mantenimiento y almacenamiento

Asegúrese de respetar todas las indicaciones que se describen en este Manual de usuario. El incumplimiento de las normas hará que la garantía del producto quede anulada.

Métodos de mantenimiento

- Limpie con frecuencia el tensiómetro.
- Utilice una toalla de tela suave y seca para limpiar este tensiómetro, si está muy sucio puede mojar la toalla ligeramente con agua o detergente neutro, escúrrala y limpie el tensiómetro.

Nota: Evite que penetre agua u otros líquidos en el tensiómetro.



Sugerencia: No limpie el tensiómetro ni el manguito con nafta, diluyente, gasolina, etc. No moje el manguito ni intente limpiarlo con agua.



Métodos de almacenamiento

Consejo

No coloque el dispositivo en los siguientes lugares:

- Lugares con fácil salpicadura, luz solar directa, altas temperaturas, humedad, polvo, lugares llenos de gases corrosivos.
- Lugares inclinados, con vibraciones, y posibles golpes.
- Lugares con productos químicos o gas corrosivo.



Consejo

- Si no lo utiliza durante mucho tiempo (más de tres meses), guárdelo extrayendo las pilas.
- El fabricante recomienda calibrar el tensiómetro de brazo una vez al año.



Directrices y declaración del fabricante - Emisión electromagnética - para todos los EQUIPOS Y SISTEMAS

1	Indicaciones y declaración del fabricante - Emisión electromagnética	
2	El producto está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del producto deben asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.	
3	Test de emisiones	Conformidad
4	Emisiones RF CISPR 11	Grupo 1
5	Emisiones RF CISPR 11	Clase B
6	Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	N/A
7	Fluctuaciones de tensión / emisiones flicker IEC 61000-3-3	N/A

Directrices y declaración del fabricante - Emisión electromagnética - para todos los EQUIPOS y SISTEMAS

Directrices y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética		
Este tensiómetro de brazo está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del tensiómetro de brazo debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.		
Test de inmunidad	EN 60601 nivel del test	Nivel de conformidad
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contacto ± 15 kV aire	± 8 kV contacto ± 15kV aire
Transitorios electrostáticos / ráfagas IEC 61000-4-4	± 2 kV para líneas de alimentación ± 1 kV para líneas de entrada/salida	± 2 kV para líneas de alimentación
Sobretensión IEC 61000 4-5	± 1 kV modo diferencial ± 2 kV modo común	±1kV modo diferencial
Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada de la fuente de alimentación IEC 61000-4-11	< 5 % UT (>95 % caída en UT) para 0.5 ciclos 40 % UT (60 % caída en UT) para 5 ciclos 70 % UT (30 % caída en UT) para 25 ciclos < 5 % UT (>95 % caída en UT) para 5 segundos	< 5 % UT (>95 % caída en UT) para 0.5 ciclos 40 % UT (60 % caída en UT) para 5 ciclos 70 % UT (30 % caída en UT) para 25 ciclos < 5 % UT (>95 % caída en UT) para 5 segundos
Frecuencia de potencia (50/60 Hz) campo magnético IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m
Nota: Ut es la tensión de CA de la red de suministro eléctrico antes de aplicar el nivel de prueba.		

Apéndice

I. Especificaciones del producto

Nombre	Monitor de tensión arterial de brazo	
Pantalla	Pantalla LCD de segmentos	
Protección a líquidos	IP21 Protección del goteo vertical de agua	
Medición	Brazo	
Rango de medición	NIBP (Presión arterial)	0-280 mmHg
	PR (Pulsaciones)	40-199 bpm
Precisión	NIBP (Presión arterial)	≤±3mmHg (±0.4kPa)
	PR (Pulsaciones)	±5%
Alimentación	4 pilas alcalinas AA o fuente de alimentación de CA opcional (CA 100-240 V)	
Parámetros eléctricos	Tensión de trabajo	4.2-6V
	Parámetros eléctricos de baja	4.4V±0.1V mostrando baja potencia, <4.2V±0.1V apagado
	Test de corriente / presión sanguínea	Sin condiciones de funcionamiento de la válvula de la bomba
	Corriente de apagado	<100uA

Dimensiones	138*106.5*44.5 (mm)		
Peso neto	250 g		
Condiciones de trabajo	Temperatura	+5°C ~ 40 °C	Si se almacena o utiliza fuera del intervalo de temperatura y humedad especificado, la tensión arterial no funcionará correctamente.
	Humedad	15%RH ~ 85%RH	
	P. atmosférica	86kPa ~ 105kPa	
Condiciones de trabajo y almacenamiento	Temperatura	-20°C ~ +55°C	Evitar golpes fuertes, impactos directos, exposición o lluvia durante el transporte. El monitor de presión arterial embalado debe almacenarse en condiciones que cumplan los requisitos de humedad y atmósfera, y en una sala ventilada y libre de gases corrosivos.
	Humedad	15% ~ 95%RH	
	P. atmosférica	50kPa ~ 105kPa	
Seguridad	Alimentación interna (cuando se utiliza un adaptador, pertenece a la clase II, alimentación interna), equipo de aplicación tipo BF		
Vida útil	5 años		
Accesorios	Manguito para adultos: para un rango de circunferencia de brazo: 22-32 cm <ul style="list-style-type: none"> • Manual de usuario • 4 pilas alcalinas AA 		

II. Instrucciones de clasificación de la presión arterial

Tabla 1 Instrucciones de clasificación de la presión arterial

LCD	Presión alta	Presión baja
Severa	≥180	≥110
Moderada	160 ~ 179	100 ~ 109
Leve	140 ~ 159	90 ~ 99
Normal alta	130 ~ 139	85 ~ 89
Normal	120 ~ 129	80 ~ 84
Óptima	≤119	≤79

III. Mensajes de error en la pantalla y las causas según la tabla de correspondencia de errores

Tabla 2 Correspondencia entre el mensaje de error de la pantalla LCD y la causa del error

Mensaje de error	Causa del error
"EO 1"	Fugas en el manguito o señal de pulso demasiado débil, por favor, compruebe el manguito, y ajústelo correctamente una vez más.
"EO 2"	Demasiado ruido en el entorno, la señal de presión arterial no se puede medir, por favor, elimine la fuente de ruido, y proceda a repetir la medición.
"EO 3"	Los resultados no son normales, repita la medición.
"EO P"	Si falla el inflado, compruebe el manguito, vuelva a ajustarlo y mida de nuevo.
"HI"	Si la presión de inflado es superior a 307 ± 8 mmHg (41 kPa ± 1 kPa), repita la medición.

Garantía y Servicio postventa

1. Se proporcionarán 3 años de garantía después de la fecha de compra o desde la entrega del producto en caso de ser posterior.
2. La empresa no podrá proporcionar servicio técnico bajo la garantía del dispositivo si se da alguno de los siguientes casos:
 - El mal funcionamiento causado por desmontar y modificar el dispositivo.
 - El mal funcionamiento interno del dispositivo causado por una caída.
 - El mal funcionamiento causado por el uso inadecuado o la falta de cuidado diligente.
 - El mal funcionamiento causado por no seguir el manual de usuario.
 - Fallos causados por desastres naturales, como inundaciones o incendios.
 - El mal funcionamiento causado por reparar el dispositivo por cuenta del usuario o un servicio técnico no autorizado.
3. Por favor, muestre su factura de compra o tarjeta de garantía en caso de necesitar servicio técnico.
4. Rogamos que se ponga en contacto con la empresa vendedora en caso de necesitar servicio técnico.
5. Cobraremos un cargo razonable cuando reparemos algunas averías que estén fuera del servicio de garantía, previo presupuesto aceptado por el cliente.
6. Se podrá elegir entre la reparación o la sustitución del producto, siempre que la opción elegida resulte objetivamente posible y no sea económicamente desproporcionada. Para ello, se considerará desproporcionada la opción elegida cuando suponga costes que no sean razonables, teniendo en cuenta el valor del producto, la escasa relevancia de la falta de conformidad o si la otra opción puede realizarse sin mayores inconvenientes para el usuario”.

Tensiómetro de brazo - *Arm Type Blood Pressure Monitor*

Modelo: YK-BPA4 Ref.: BPTEN-24



Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd

1st&2nd floor, 6#01, 6#02, No.6 Building 1st Phase Economic Development Manufacturing Zone, LIANDO U Valley, 221000 Xuzhou, P. R. China.



Prolinx GmbH

Brehmstr. 56, 40239 Düsseldorf, Germany



El marcado de conformidad CE 0123 representa el número de identificación del Organismo Notificado.



Información de contacto y servicio

930 011 850